

Anleitung zur Stuhlprobennahme mit Stuhlprobenröhrchen

Vorbereitung:

Nehmen Sie den Papier-Stuhlfänger und das Stuhlprobenröhrchen aus dem Plastikbeutel. Stuhlprobe mit Hilfe des Papier-Stuhlfängers gemäß aufgedruckter Anleitung auffangen.

1 Dosierstab herausziehen:

Das Stuhlprobenröhrchen am **blauen Konuseinsatz** festhalten (**der blaue Konuseinsatz bleibt verschlossen auf dem Stuhlprobenröhrchen**).

Dann den **gelben Dosierstab** aufdrehen und herausziehen.




Die Flüssigkeit **nicht** aus dem Stuhlprobenröhrchen schütten!

2 Stuhlprobe aufnehmen:

Mit dem Dosierstab **3-mal** an verschiedenen Stellen einer Stuhlprobe einstechen.

Alle Rillen der Dosierstabspitze müssen sich dabei mit Stuhlprobe füllen.

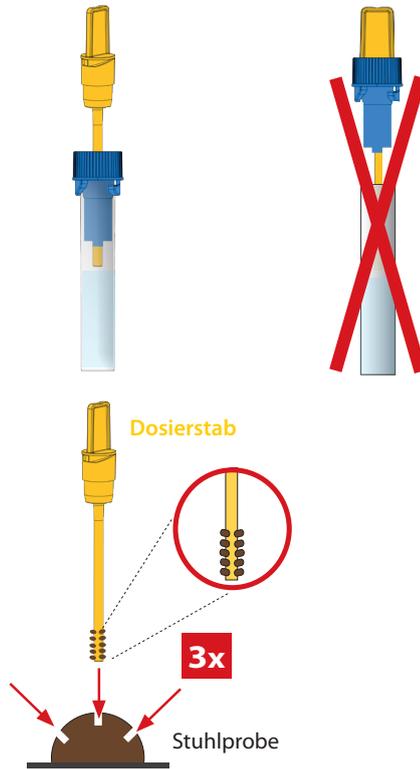

3 Dosierstab nur 1-mal zurückführen:

Den Dosierstab mit der daran anhaftenden Stuhlprobe **einmal** zurück in das Stuhlprobenröhrchen stecken und **nicht wieder herausziehen**.

Der überschüssige Stuhl wird dabei an der engen Öffnung des blauen Konuseinsatzes abgestreift.

Bitte beachten Sie:


Es darf nur **diese definierte Stuhlmenge** am Dosierstab in das Stuhlprobenröhrcheninnere gelangen.

4 Stuhlprobenröhrchen zudrehen:

Dann drehen Sie den Dosierstab so zu, dass der Klickverschluss hörbar einrastet.

Bitte beachten Sie: Die **Stuhllösung** im Stuhlprobenröhrcheninneren **verfärbt sich nahezu gar nicht**. Bei **mehrfachem Einführen** des Dosierstabs in das Stuhlprobenröhrcheninnere verfärbt sich die Stuhllösung braun, was auf eine erhöhte Stuhlkonzentration hinweist.

Ihre Probe kann dann nicht mehr gemessen werden, da die Messung eventuell zu einem falsch positiven Ergebnis führen könnte.

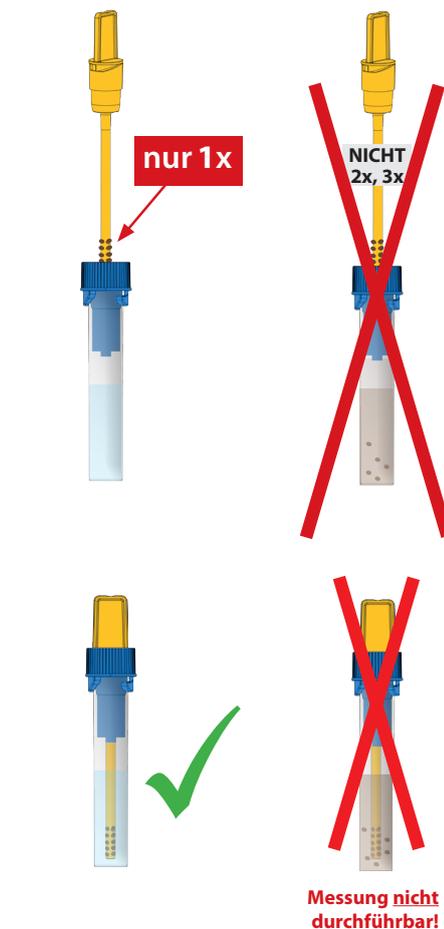

5 Rückgabe der Stuhlprobe:

Bitte legen Sie das Stuhlprobenröhrchen gemeinsam mit der Saugelinge in den dafür vorgesehenen Plastikbeutel und verschließen Sie ihn sorgfältig. Anschließend legen Sie den Beutel in die beiliegende Versandpackung (braune Box) und verschließen diese fest mit dem im Deckel angebrachten Klebestreifen. Die Versandpackung ist bereits vorfrankiert und sollte **am gleichen Tag, spätestens aber am Folgetag** direkt in einen Briefkasten der Deutschen Post eingeworfen oder in einer Filiale abgegeben werden.

Sie erhalten für die Stuhlprobennahme (K 6999SET):

- 1 Anleitung zur Stuhlprobenentnahme
- 1 Papier-Stuhlfänger
- 1 Stuhlprobenröhrchen befüllt mit Flüssigkeit (Extraktionslösung *IDK Extract*®, K 6999)
- 1 Plastikbeutel mit Saugelinge für den hygienischen Transport des Stuhlprobenröhrchens



Vorsichtsmaßnahmen:

- Inhalt des Stuhlprobenröhrchens nicht trinken, direkten Kontakt zur Flüssigkeit vermeiden. Nach Hautkontakt die betroffenen Stellen sofort gründlich waschen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nach der Stuhlprobennahme stets die Hände waschen/desinfizieren.

Symbolerklärung:

	Temperaturbegrenzung		Hersteller
	<i>In-vitro</i> Diagnostikum: nur zur Anwendung außerhalb des Körpers		Chargennummer
	Bestellnummer		Verwendbar bis

